

内容量
[アルコールクロス100枚入り] 140mm×180mm×100枚 [アルコールスプレー] 480mL [アルコールクロス300枚入り] 140mm×250mm×300枚
成分
エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤

**用途**  
 手がよく触れる環境表面の除菌・抗菌(ドア、机、ベッド周り、車いす、スイッチ類、手すり等)  
 ※1 布製品の除菌・抗菌(カーテン、布張りソファ、カーペット等) ※2 アルコールスプレー



[アルコールスプレー] 使用前にボトルをよく振り、ノズルをONの位置にして、不織布などにスプレーして清拭、もしくは直接スプレーしてください。使用後はノズルをOFFの位置に戻してください。

**保管上の注意**  
 火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。※2乾燥を防ぐため使用後は蓋をしっかりと閉め、開封後はできるだけ早く使い切ってください。※2アルコールクロス

**使用上の注意**

火気のそばで使用しないでください。目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用された場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて、手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。蒸気、ミストを吸入しないようにしてください。素材によっては変色、変質する場合がありますので、目立たない部分で確認してから使用してください。レンズ等へは使用しないでください。コーティングがはがれるおそれがあります。クロスは水に溶けないため、トイレには流さないでください。人体や食品・食器には使用しないでください。用途以外には使用しないでください。クロスは本製品の詰替用クロスをご使用ください。



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
**製品ラインアップ**

品名	製品イメージ	内容量	価格	JAN
<b>Hydro Ag+ (アルコール 80%)</b>				
Hydro Ag+ アルコールクロス専用ボトル (アルコール 80% 100枚入り) ※クロスは含まれません		—	オープン	4547410347432
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 80% 100枚入り) 詰替用		140mm×180mm 100枚	オープン	4547410347449
Hydro Ag+ アルコールクロス専用容器 (アルコール 80% 300枚入り) ※クロスは含まれません		—	オープン	4547410371925
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 80% 300枚入り) 詰替用		140mm×250mm 300枚	オープン	4547410371932
Hydro Ag+ アルコールスプレー (アルコール 80%)		480ml	オープン	4547410347401
<b>Hydro Ag+ (アルコール 60%)</b> 高濃度のアルコールで変色・色落ち・劣化しやすい機器には、アルコール濃度60%のクロス・スプレーもご用意しています。				
Hydro Ag+ アルコールクロス専用ボトル (アルコール 60%) ※クロスは含まれません		—	オープン	4547410347470
Hydro Ag+ アルコールクロス (アルコール 60%) 詰替用		140mm×180mm 100枚	オープン	4547410347487
Hydro Ag+ アルコールスプレー (アルコール 60%)		480ml	オープン	4547410347425

**FUJIFILM**

発売元  
 富士フイルム株式会社  
 〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル  
 TEL: 050-3786-1711(富士フイルムお客様コミュニケーションセンター)

本製品のお問い合わせはこちらへ  
[hydro\\_ag@fujifilm.com](mailto:hydro_ag@fujifilm.com)



**FUJIFILM**  
 Value from Innovation

医療現場における、さらなる安心  
**Hydro Ag+**  
 ハイドロ エージープラス

**持続除菌**

アルコールスプレー・クロス



# 独自技術による “持続力”ある環境除菌で 院内感染のリスクを軽減


Hydro Ag<sup>+</sup>は、アルコールによる除菌効果に加えて、銀系抗菌剤と超親水コートによる“持続除菌”を兼ね備え、院内環境を感染のリスクから守り続けます。



## 長時間にわたり除菌性能を発揮

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag<sup>+</sup>技術によって、アルコールが蒸発した後も持続的に微生物の増殖を抑制します。

### 従来のアルコールクロスの場合

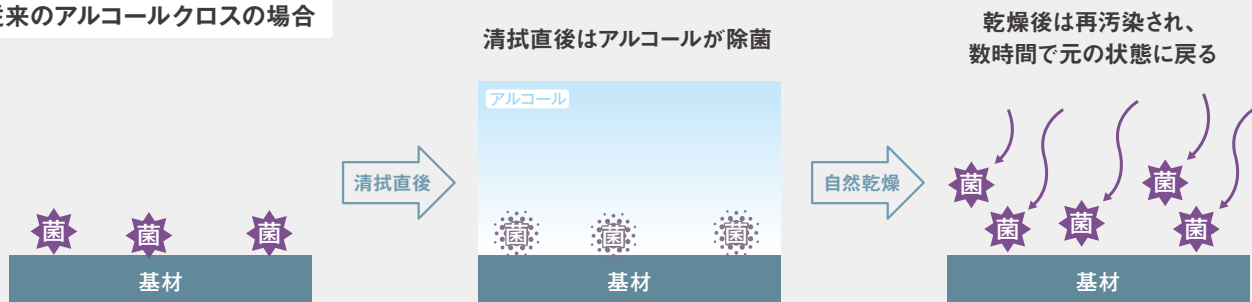


### Hydro Ag<sup>+</sup>の場合



## 従来にない「持続除菌」性能

従来のアルコール同等の除菌性能を発揮。さらに銀系抗菌剤と超親水ポリマーによる“持続除菌”も従来品を大きく超える効果が見込めます。

### 従来品同等の除菌性能に銀の持続性をプラス

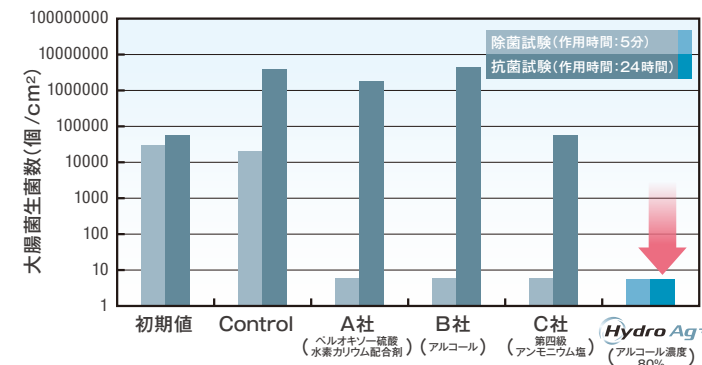


除菌試験:住宅用合成洗剤、及び石けん除菌活性試験準拠  
抗菌試験:JISZ2801抗菌性試験準拠

## 継続使用で持続除菌効果をさらにアップ

同一箇所に対して繰り返し用いることで、より強固なHydro Ag<sup>+</sup>コート膜が形成され、効果を高めることができます。


### Hydro Ag<sup>+</sup>塗り重ね効果(アルコール濃度80%)

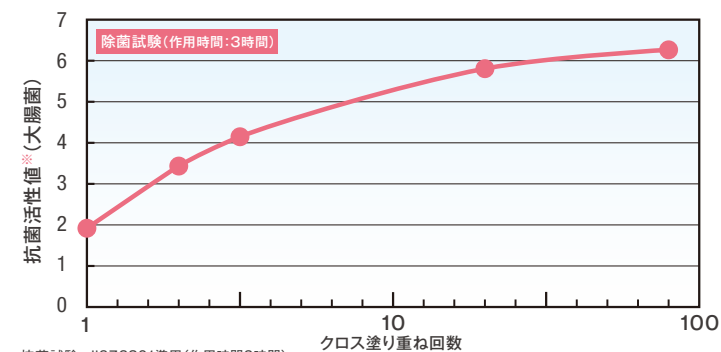

抗菌試験:JISZ2801準用(作用時間3時間)  
※「抗菌活性値」とは微生物が何桁減少したかを示します

## 幅広い菌やウイルスに効果を発揮

Hydro Ag<sup>+</sup>は、細菌だけでなく、ウイルスやカビ等、さまざまな微生物の増殖を抑制します。

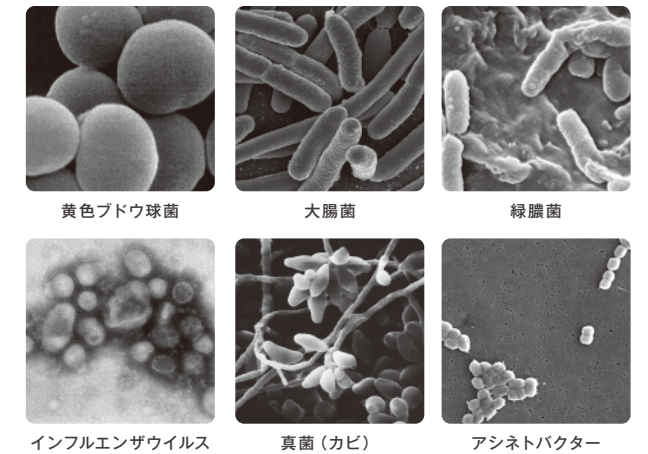

※全ての微生物への効果を保証するものではありません。対象となる微生物についてはお問い合わせください。

## 人体へのリスクを防ぐ高い安全性

経口毒性	GHS区分は「区分外」 (LD50>2,000mg/kg)
皮膚刺激性	GHS区分は「区分外」 (無刺激)
皮膚感作性	LLNA:BrdU-ELISA法 陰性
生殖細胞変異原性	Ames試験 陰性
発がん性	IARCランク1, 2A, 2B 該当物質なし

## 院内のさまざまな箇所にお使いいただけます。

- 病棟のあらゆる手に触れる環境表面に使用可能。患者様はもちろん、来院者や医療従事者の感染リスクを抑えます。
- クロスタイプとスプレータイプの使い分けにより、対象物の設置場所や素材、形状などの違いに柔軟に対応します。

